

COMO ELEGIR EL TAMAÑO Y LA FORMA DE LOS IMPLANTES BICON



Desde 1985 » Simple. Previsible. Rentable.

Para saber el tamaño de la plataforma del implante, debo de preguntarme ¿de qué color es el análogo?

- **Rojo-morado** plataforma de 2mm.
- **Azul** plataforma de 2,5 mm.
- **Verde** plataforma de 3mm.

Para elegir el diámetro del pilar necesitamos saber ¿En qué pieza está el implante? y tomaremos a modo de referencia las siguientes indicaciones para elegir el diámetro.

Estas indicaciones son meramente orientativas, el profesional con el modelo delante, tiene más información para poder decidir el tamaño idóneo.

- Para Incisivos o caninos se suele elegir un diámetro de 4mm
- Premolares el diámetro más común es el de 5mm
- Molares debes elegir entre 5 o 6,5mm. la medida de 7,5 es muy extraño que se coloque.

¿Cómo lo necesitas recto o angulado?

Bicon dispone de diferentes medidas, en función de que el pilar sea con o sin hombro, te indicamos algunas particularidades en función del tipo de pilar.

Pilares sin hombro: (Ver gráfico página 5)

Disponible con angulación de 0º, 15º y 25º

Los de poste de 2mm y 2,5 mm. tienen variedad de angulados de 25º, pero en plataforma 3mm solo tienen un pilar de 5x6,5mm a 25º.

Pilares con hombro: (Ver gráfico página 4)

Sólo dispone con angulación a 0º y 15º, no hay angulación de 25º

Para elegir el pilar debemos preguntarnos ¿Qué altura hay desde el implante hasta la encía por vestibular y lingual?

En los casos con pilares con hombro, elegiremos el pilar con un hombro mayor o menor, en función del perfil de emergencia de la encía, para que el final del hombro, nos quede un poco por debajo de la línea de la encía.

Pilares con hombro, también llamados Pilares Universales

Tienen 3 alturas de perfil (ver gráfico página 4):

La altura desde el hombro, hasta el final del pilar, siempre es de 4mm.

- **2mm alto** ----->Altura total del pilar sumando el muñón de titanio 6mm.
- **4mm alto** ----->Altura total del pilar sumando el muñón de titanio 8mm.
- **6mm alto** ----->Altura total del pilar sumando el muñón de titanio 10mm.

Las distintas alturas de perfil, junto con el diámetro del pilar, se indican con la siguiente nomenclatura en la cabeza de los pilares:

2mm perfil bajo (Low) se representa la cifra del ancho del pilar seguido de la letra "L"

4mm perfil estándar, solo indica el diámetro del pilar, sin letra.

6mm perfil alto (Tall) se representa la cifra del ancho del pilar seguido de la letra "T"

Si el doctor ha colocado un pilar de cicatrización de 6,5 o 7mm de diámetro y queremos colocar un pilar con hombro (no existen pilares con hombro de 6.5 ni de 7.5mm) pondremos un pilar de 6 o 7mm, la diferencia la asume la encía.

Según la imagen de la página 3, puede haber alguna pequeña diferencia en el alto, pero es mínima y por tanto se toman estas alturas de perfil (2,4 y 6 mm.) como referencia.

La serie del pilar (indicada con un número, en la cabeza del pilar) nos indica el diámetro del pilar en su zona más ancha.

Es importante comprobar que el pilar tenga el suficiente tamaño para dar un correcto soporte a la corona.

Los pilares sin hombro, siempre tienen la misma altura de perfil

Ver gráfico página 5.

Plataforma de 3 y 2,5 mm----->2,5mm

Plataforma de 2 mm----->3 mm

Suma a la altura del perfil, la altura del pilar indicada en el catálogo y/o en el gráfico y comprueba si tiene el suficiente tamaño para dar un correcto soporte a la corona.

Los pilares con hombro, también llamados Pilares Universales

Tienen 3 alturas de perfil (ver gráfico página 4):

La altura desde el hombro, hasta el final del pilar, siempre es de 4mm.

2mm alto, perfil bajo ----->Altura total del pilar sumando el muñón de titanio 6mm.

4mm alto, perfil estándar ----->Altura total del pilar sumando el muñón de titanio 8mm.

6mm alto, perfil alto ----->Altura total del pilar sumando el muñón de titanio 10mm.

La serie del pilar (indicada con un número, en la cabeza del pilar) nos indica el ancho del pilar en su zona más ancha.

Si hemos colocado un pilar de cicatrización de 6,5 o 7mm de diámetro y queremos colocar un pilar con hombro (no existe pilar con hombro de 6.5 ni de 7) pondremos un pilar de 6 o 7mm, la diferencia la asume la encía.

Según la imagen de la página 3, puede haber alguna pequeña diferencia en el alto, pero es mínima y por tanto se toman estas alturas de perfil (2,4 y 6 mm.) como referencia.

Es importante comprobar que el pilar tenga el suficiente tamaño para dar un correcto soporte a la corona.

Los pilares sin hombro, siempre tienen la misma altura de perfil

Ver gráfico página 5.


Plataforma de 3 y 2,5 mm----> H=2,5mm

Plataforma de 2 mm-----> H=3 mm

Suma a la altura del perfil, la altura del pilar indicada en el catálogo y/o en el gráfico y comprueba si tiene el suficiente tamaño para dar un correcto soporte a la corona.

4

SERIE

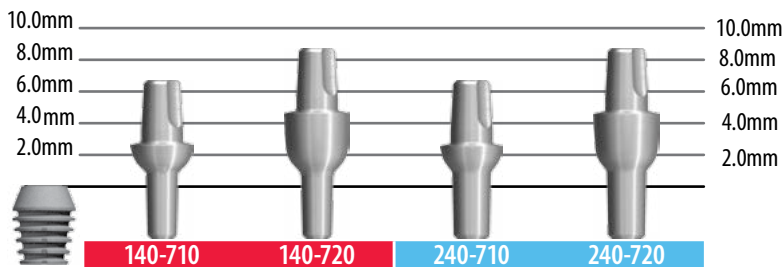


MEDIDA DEL POSTE

- 2.0mm Poste
- 2.5mm Poste
- 3.0mm Poste


5

SERIE

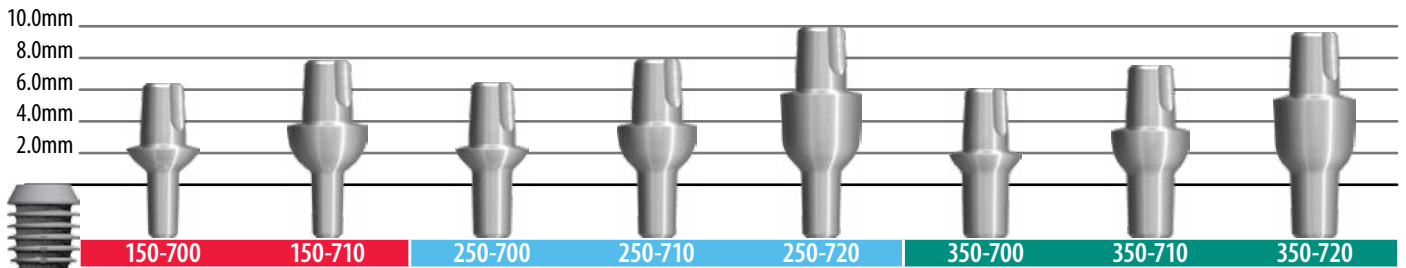


6

SERIE

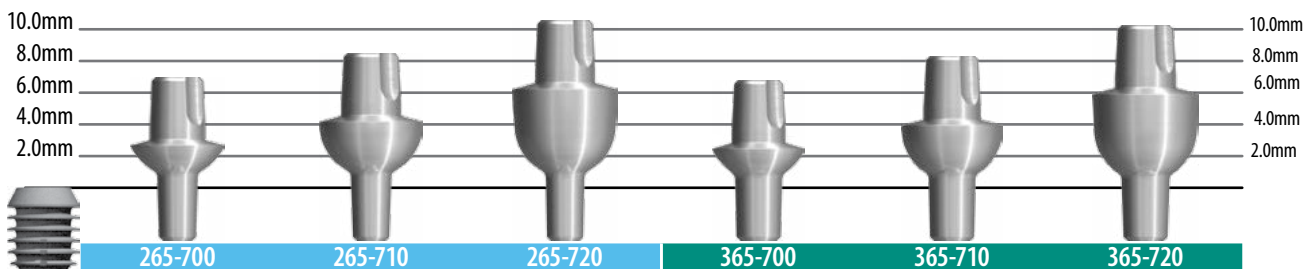


7

SERIE

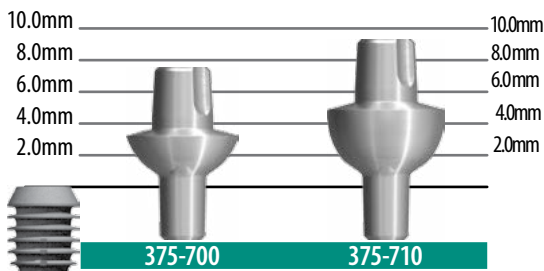


*Se dispone de un complemento completo de pilares universales de ángulo de 15°.

COMPONENTES PARA PILAR UNIVERSAL

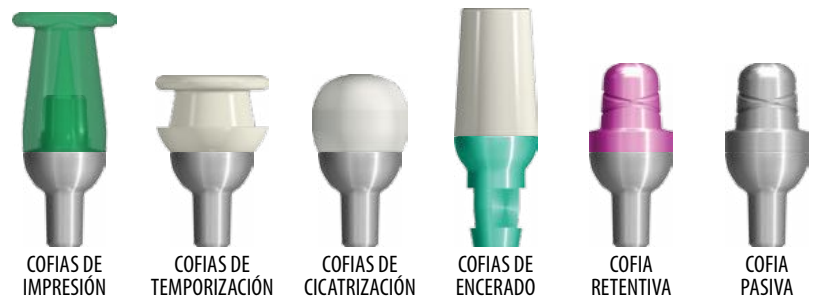

ANÁLOGOS DEL PILAR UNIVERSAL

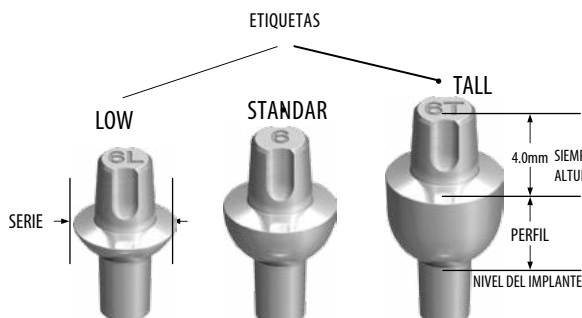

SERIE	BAJO	ESTÁNDAR	ALTO
4		4	4T
5	5L	5	5T
6	6L	6	6T
7	7L	7	

PILARES SIN HOMBRO



3.0mm Post



2.5mm Post



2.0mm Post

REFERENCIA	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
340-001	4.0mm	6.5mm	0°
340-015	4.0mm	6.5mm	15°
340-101	4.0mm	10.0mm	0°
340-115	4.0mm	10.0mm	15°
350-050	5.0mm	5.0mm	0°
350-055	5.0mm	5.0mm	15°
350-001	5.0mm	6.5mm	0°
350-015	5.0mm	6.5mm	15°
350-025	5.0mm	6.5mm	25°
350-101	5.0mm	10.0mm	0°
350-115	5.0mm	10.0mm	15°
350-201	5.0mm	12.0mm	0°
350-215	5.0mm	12.0mm	15°
365-050	6.5mm	5.0mm	0°
365-055	6.5mm	5.0mm	15°
365-001	6.5mm	6.5mm	0°
365-015	6.5mm	6.5mm	15°
375-801	7.5mm	8.0mm	0°
375-815	7.5mm	8.0mm	15°


REFERENCIA	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
240-001	4.0mm	6.5mm	0°
240-015	4.0mm	6.5mm	15°
240-025	4.0mm	6.5mm	25°
240-101	4.0mm	10.0mm	0°
240-115	4.0mm	10.0mm	15°
250-001	5.0mm	6.5mm	0°
250-015	5.0mm	6.5mm	15°
250-025	5.0mm	6.5mm	25°
250-111	5.0mm	10.0mm	0°
250-115	5.0mm	10.0mm	15°
265-050	6.5mm	5.0mm	0°
265-055	6.5mm	5.0mm	15°

REFERENCIA	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
140-002	4.0mm	6.5mm	0°
140-015	4.0mm	6.5mm	15°
140-025	4.0mm	6.5mm	25°
140-101	4.0mm	10.0mm	0°
140-115	4.0mm	10.0mm	15°
150-001	5.0mm	6.5mm	0°
150-015	5.0mm	6.5mm	15°
150-025	5.0mm	6.5mm	25°
150-201	5.0mm	12.0mm	0°
150-215	5.0mm	12.0mm	15°

Pilar Brevis™




Pilar Locator®

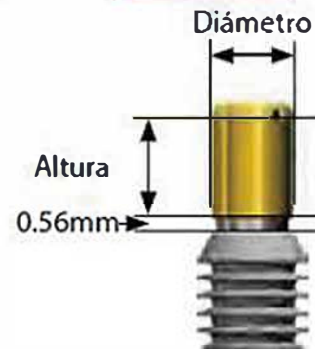

2.0mm Post

2.5mm Post

3.0mm Post

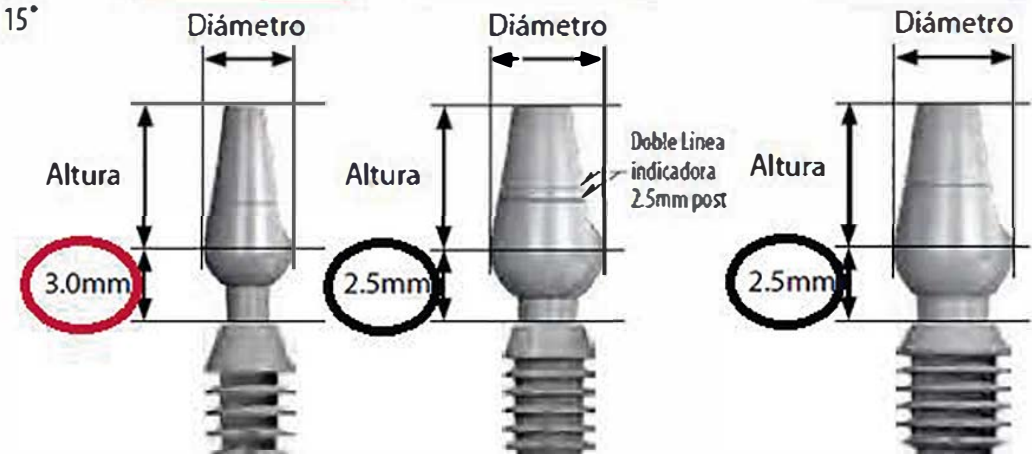

PILARES DE CICATRIZACIÓN

		Poste de 2.0mm
NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
240-500	4.0mm	5.0mm
240-800	4.0mm	8.0mm
250-500	5.0mm	5.0mm
250-800	5.0mm	8.0mm

		Poste de 2.5mm
NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
240-525	4.0mm	5.0mm
250-525	5.0mm	5.0mm

		Poste de 3.0mm
NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
350-500	5.0mm	5.0mm
350-800	5.0mm	8.0mm
365-500	6.5mm	5.0mm
365-800	6.5mm	8.0mm
375-500	7.5mm	5.0mm

COFIAS DEL PILAR UNIVERSAL PARA TELESCÓPICAS SOLO SERIE 5 (2 UD/REF)



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
105-700	UAS LP Cofias Retentivas
105-705	UAS LP Cofias Pasivas
105-710	UAS SP/TP Cofias Retentivas
105-715	UAS SP/TP Cofias Pasivas

KITS PROTÉSICOS DEL PILAR UNIVERSAL (5-5T Kit Descrito Abajo)



NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL
100-945	4	SP, TP
100-950	5	LP
100-955	5	SP, TP
100-960	6	LP
100-965	6	SP, TP
100-970	7	LP, SP

PILARES UNIVERSALES


			Poste de 2.0mm
NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL	ÁNGULO
140-710	4	SP	0°
140-715	4	SP	15°
140-720	4	TP	0°
150-700	5	LP	0°
150-705	5	LP	15°
150-710	5	SP	0°
150-715	5	SP	15°

			Poste de 2.5mm
240-710	4	SP	0°
240-715	4	SP	15°
240-720	4	TP	0°
240-725	4	TP	15°
250-700	5	LP	0°
250-705	5	LP	15°
250-710	5	SP	0°
250-715	5	SP	15°
250-720	5	TP	0°
250-725	5	TP	15°
265-700	6	LP	0°
265-705	6	LP	15°
265-710	6	SP	0°
265-715	6	SP	15°
265-720	6	TP	0°
265-725	6	TP	15°

			Poste de 3.0mm
350-700	5	LP	0°
350-705	5	LP	15°
350-710	5	SP	0°
350-715	5	SP	15°
350-720	5	TP	0°
350-725	5	TP	15°
365-700	6	LP	0°
365-705	6	LP	15°
365-710	6	SP	0°
365-715	6	SP	15°
365-720	6	TP	0°
365-725	6	TP	15°
375-700	7	LP	0°
375-705	7	LP	15°
375-710	7	SP	0°

COMPONENTES DEL PILAR UNIVERSAL

Cofias de Impresión (3)

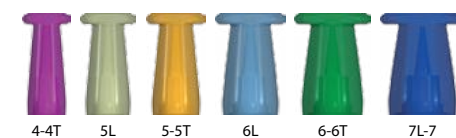


NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL
100-746	4	SP, TP
100-751	5	LP
100-756	5	SP, TP
100-761	6	LP
100-766	6	SP, TP
100-771	7	LP, SP

Cofias de Temporización (3)




NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL
100-845	4	SP, TP
100-850	5	LP
100-855	5	SP, TP
100-860	6	LP
100-865	6	SP, TP
100-870	7	LP, SP

Cofias de Cicatrización (3)

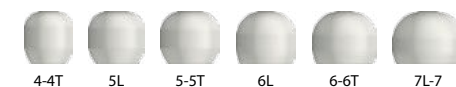

NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL
100-846	4	SP, TP
100-851	5	LP
100-856	5	SP, TP
100-861	6	LP
100-866	6	SP, TP
100-871	7	LP, SP

Cofias de Encerado (3)

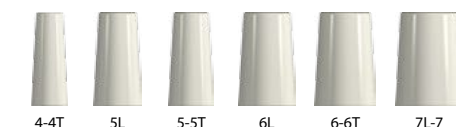

NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL
100-749	4	SP, TP
100-754	5	LP
100-759	5	SP, TP
100-764	6	LP
100-769	6	SP, TP
100-774	7	LP, SP

ANÁLOGOS DEL PILAR UNIVERSAL (2)



NO. DE PROD.	SERIE	PERFIL
100-745	4	SP, TP
100-750	5	LP
100-755	5	SP, TP
100-760	6	LP
100-765	6	SP, TP
100-770	7	LP, SP

PILARES SIN HOMBRO



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
140-002	4.0mm	6.5mm	0°
140-015	4.0mm	6.5mm	15°
140-025	4.0mm	6.5mm	25°
140-101	4.0mm	10.0mm	0°
140-115	4.0mm	10.0mm	15°
150-001	5.0mm	6.5mm	0°
150-015	5.0mm	6.5mm	15°
150-025	5.0mm	6.5mm	25°
150-201	5.0mm	12.0mm	0°
150-215	5.0mm	12.0mm	15°



Poste de 2.5mm

240-001	4.0mm	6.5mm	0°
240-015	4.0mm	6.5mm	15°
240-025	4.0mm	6.5mm	25°
240-101	4.0mm	10.0mm	0°
240-115	4.0mm	10.0mm	15°
250-001	5.0mm	6.5mm	0°
250-015	5.0mm	6.5mm	15°
250-025	5.0mm	6.5mm	25°
250-111	5.0mm	10.0mm	0°
250-115	5.0mm	10.0mm	15°
265-050	6.5mm	5.0mm	0°
265-055	6.5mm	5.0mm	15°



Poste de 3.0mm

340-001	4.0mm	6.5mm	0°
340-015	4.0mm	6.5mm	15°
340-101	4.0mm	10.0mm	0°
340-115	4.0mm	10.0mm	15°
350-050	5.0mm	5.0mm	0°
350-055	5.0mm	5.0mm	15°
350-001	5.0mm	6.5mm	0°
350-015	5.0mm	6.5mm	15°
350-025	5.0mm	6.5mm	25°
350-101	5.0mm	10.0mm	0°
350-115	5.0mm	10.0mm	15°
350-201	5.0mm	12.0mm	0°
350-215	5.0mm	12.0mm	15°
365-050	6.5mm	5.0mm	0°
365-055	6.5mm	5.0mm	15°
365-001	6.5mm	6.5mm	0°
365-015	6.5mm	6.5mm	15°
375-801	7.5mm	8.0mm	0°
375-815	7.5mm	8.0mm	15°

COFIAS DE EMERGENCIA PARA PILARES SIN HOMBRO (4)



4.0mm



5.0mm



6.5mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO
140-010	4.0mm
150-010	5.0mm
165-065	6.5mm

COMPONENTES PROTÉSICOS PARA PILAR SIN HOMBRO

Kits de Laboratorio y Protésico*



4.0 x 6.5mm

4.0 x 10mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	LONGITUD
140-465	4.0mm	6.5mm
140-410	4.0mm	10.0mm



5.0 x 5.0mm

5.0 x 6.5mm

5.0 x 10mm

5.0 x 12mm

150-450	5.0mm	5.0mm
150-465	5.0mm	6.5mm
150-410	5.0mm	10.0mm
150-412	5.0mm	12.0mm



6.5 x 5.0mm

6.5 x 6.5mm

165-450	6.5mm	5.0mm
165-465	6.5mm	6.5mm



7.5 x 8.0mm

175-480	7.5mm	8.0mm
---------	-------	-------

*Cada kit contiene (1) análogo del pilar, (1) cofia de impresión/encerado, y (1) cofia de temporización.

Cofías de Temporización (2)



4.0mm



5.0mm



6.5mm



7.5mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO
140-165	4.0mm
150-165	5.0mm
165-165	6.5mm
175-165	7.5mm

TALLADO DEL PILAR



Soporte para Tallar con Puntas



Punta de 2.0mm



Punta de 2.5mm

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
101-395	Soporte para Tallar con Puntas
701-382	Punta de 2.0mm
701-385	Punta de 2.5mm

FÓRCEPS DE PILAR



Fórceps Transportador de Pilar



Fórceps para Extracción de Pilar (Superior)



Fórceps para Extracción de Pilar (Inferior)

801-002	Fórceps Transportador
801-055	Fórceps para Extracción (Superior)
801-056	Fórceps para Extracción (Inferior)

IMPLANTES PROVISIONALES BREVIS™*



8.0mm



12.0mm



Direccionador Recto

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
425-208	2.5mm	8.0mm
425-212	2.5mm	12.0mm
101-902	Direccionador Mecánico para Implante Provisional Brevis	

*Capuchón Brevis se vende por separado.

PILARES BREVIS™*



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	ALTURA	ÁNGULO
100-404	2.0mm	0°
100-405	2.0mm	15°
100-406	4.0mm	0°
100-407	4.0mm	15°
100-408	6.0mm	0°
100-409	6.0mm	15°



Poste de 2.5mm

250-424	2.0mm	0°
250-425	2.0mm	15°
250-426	4.0mm	0°
250-427	4.0mm	15°
250-428	6.0mm	0°
250-429	6.0mm	15°



Poste de 3.0mm

300-434	2.0mm	0°
300-435	2.0mm	15°
300-436	4.0mm	0°
300-437	4.0mm	15°
300-438	6.0mm	0°
300-439	6.0mm	15°

*Cada pilar es empaquetado con un Capuchón de titanio Brevis y un anillo de goma.

COMPONENTES DE PILAR BREVIS™



Anillos de Goma de Retención Mayor



Anillos de Goma de Retención Menor

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
100-013	Anillos de Goma de Retención Mayor (10)
100-014	Anillos de Goma de Retención Menor (10)



Anillo de Goma



Capuchón Brevis



Capuchón de Impresión Negro



Pilar Análogo

100-212	Kit Brevis para Consultorio
100-217	Kit Brevis para Laboratorio
100-218	Kit Brevis para Laboratorio sin Capuchón

PILARES LOCATOR® * Δ



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
200-501	4.0mm	1.0mm
200-502	4.0mm	2.0mm
200-503	4.0mm	3.0mm
200-504	4.0mm	4.0mm
200-505	4.0mm	5.0mm



Poste de 2.5mm

250-501	4.0mm	1.0mm
250-502	4.0mm	2.0mm
250-503	4.0mm	3.0mm
250-504	4.0mm	4.0mm
250-505	4.0mm	5.0mm



Poste de 3.0mm

300-501	4.0mm	1.0mm
300-502	4.0mm	2.0mm
300-503	4.0mm	3.0mm
300-504	4.0mm	4.0mm
300-505	4.0mm	5.0mm

*Cada Pilar Locator es empaquetado con un kit procesador macho.

ΔPuede ser necesario el uso de una fresa escavadora de surco antes de asentar un Pilar Locator.

COMPONENTES PARA PILAR LOCATOR®



2.3 kg (5.0 lb.) Retención Macho



1.4 kg (3.0 lb.) Retención Macho



0.7 kg (1.5 lb.) Retención Macho



Procesador Macho



Capuchón Metálica



Bloqueo Espaciador

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
--------------	-------------

100-519 Kit Procesador Macho (2)



1.4 kg (3.0 lb.) Capuchón de Retención



0.9 kg (2.0 lb.) Capuchón de Retención



0.5 kg (1.0 lb.) Capuchón de Retención

100-521 Capuchón con Conexión Extendido Verde (4)

100-525 Capuchón con Conexión Extendido Naranja (4)

100-526 Capuchón con Conexión Extendido Roja (4)



Cofia de Impresión



Análogo de Impresión

100-524 Kit de Impresión



101-839 Instrumento Principal Locator

PILARES DE PRÓTESIS ATORNILLADA*



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA	ÁNGULO
100-003	4.0mm	3.0mm	0°
100-015	4.0mm	3.0mm	15°
100-004	4.0mm	5.0mm	0°
100-115	4.0mm	5.0mm	15°



Poste de 2.5mm

250-213	4.0mm	3.0mm	0°
250-215	4.0mm	3.0mm	15°
250-214	4.0mm	5.0mm	0°
250-255	4.0mm	5.0mm	15°



Poste de 3.0mm

300-003	4.0mm	3.0mm	0°
300-015	4.0mm	3.0mm	15°
300-004	4.0mm	5.0mm	0°
300-115	4.0mm	5.0mm	15°

COMPONENTES PARA PILAR DE PRÓTESIS ATORNILLADA*



Cofias Plásticas Transferente y Moldeable



Cofias Transferente de Titanio



Análogos de Pilar de Titanio

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
--------------	-------------

100-005 Cofia Plástica (4)

100-019 Cofia de Titanio (4)

100-006 Análogo de Titanio (4)



Tornillos Hexagonales de 5.0mm



Tornillos Hexagonales de 10.0mm



Tornillos de Retención Hexagonales



Tornillos de Cobertura Hexagonales

100-016 Tornillos Hexagonales de 5.0mm (4)

100-017 Tornillos Hexagonales de 10.0mm (4)

100-020 Tornillos de Retención Hexagonales (4)

100-021 Tornillos de Cobertura Hexagonales (4)



101-024 Destornillador Hexagonal

*Para restauraciones en barra retenidas por tornillos.

IMPLANTES



Cavidad Conectora de 3.0mm

Integra-CP®

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	LONGITUD
345-305	4.5mm	5.0mm
345-306	4.5mm	6.0mm
345-308	4.5mm	8.0mm
345-311	4.5mm	11.0mm
350-305	5.0mm	5.0mm
350-306	5.0mm	6.0mm
350-308	5.0mm	8.0mm
350-311	5.0mm	11.0mm
360-305	6.0mm	5.0mm
360-306	6.0mm	6.0mm
360-108	6.0mm	8.0mm



Cavidad Conectora de 2.5mm

Integra-CP®

340-255	4.0mm	5.0mm
340-256	4.0mm	6.0mm
340-258	4.0mm	8.0mm
340-251	4.0mm	11.0mm
345-258	4.5mm	8.0mm
345-251	4.5mm	11.0mm



Cavidad Conectora de 2.0mm

Integra-CP®

330-206	3.0mm	6.0mm
330-208	3.0mm	8.0mm
335-008	3.5mm	8.0mm
335-011	3.5mm	11.0mm

TAPONES DE CICATRIZACIÓN



NO. DE PROD.	DIÁMETRO
100-002	2.0mm
100-025	2.5mm
100-001	3.0mm

PRODUCTOS DE COLÁGENO



Membrana



Tapón

NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN
509-600	15 x 20mm Membrana
509-300	20 x 30mm Membrana
509-800	30 x 40mm Membrana
509-400	Tapón de Colágeno (10)

SYNTHOGRAFT™



NO. DE PROD.	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE LA PARTÍCULA	GRAMOS TOTALES	VIALES
400-125	0.25g	Pequeña	1.25g	5
400-150	0.5g	Pequeña	2.5g	5
400-151	1.0g	Pequeña	5.0g	5
400-152	2.0g	Pequeña	10.0g	5
400-525	0.25g	Grande	1.25g	5
400-500	0.5g	Grande	2.5g	5
400-501	1.0g	Grande	5.0g	5
400-502	2.0g	Grande	10.0g	5

INSTRUMENTACIÓN PARA INJERTO ÓSEO



801-510 Jeringa para Injerto Óseo 4.0mm

801-511 Jeringa para Injerto Óseo 5.0mm

IMPRESIÓN A NIVEL DE IMPLANTE



Poste de Impresión de Titanio



Cofia Plástica de Impresión



Implante Análogo de Titanio

Poste de 3.0mm

NO. DE PROD. DESCRIPCIÓN

100-433	Poste y Cofia de Impresión*
100-434	Kit de Impresión a Nivel de Implante**
100-435	Cofia de Impresión (4)
100-388	Implante Análogo (2)



Poste de Impresión de Titanio



Cofia Plástica de Impresión



Implante Análogo de Titanio

Poste de 2.5mm

100-413	Poste y Cofia de Impresión*
100-414	Kit de Impresión a Nivel de Implante**
100-415	Cofia de Impresión (4)
100-288	Implante Análogo (2)



Poste de Impresión de Titanio



Cofia Plástica de Impresión



Implante Análogo de Titanio

Poste de 2.0mm

100-423	Poste y Cofia de Impresión*
100-424	Kit de Impresión a Nivel de Implante**
100-425	Cofia de Impresión (4)
100-188	Implante Análogo (2)

*Contiene dos postes de impresión de titanio y dos cofias plásticas de impresión.

**Contiene un poste de impresión de titanio, dos cofias plásticas de impresión y un implante análogo de titanio.

PILARES TEMPORALES (Ti)



Poste de 2.0mm

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
140-245	4.0mm	4.5mm
140-265	4.0mm	6.5mm
150-245	5.0mm	4.5mm
150-265	5.0mm	6.5mm



Poste de 2.5mm

240-545	4.0mm	4.5mm
240-565	4.0mm	6.5mm
250-545	5.0mm	4.5mm
250-565	5.0mm	6.5mm
265-545	6.5mm	4.5mm
265-565	6.5mm	6.5mm



Poste de 3.0mm

340-345	4.0mm	4.5mm
340-365	4.0mm	6.5mm
350-345	5.0mm	4.5mm
350-365	5.0mm	6.5mm
365-345	6.5mm	4.5mm
365-365	6.5mm	6.5mm
375-345	7.5mm	4.5mm
375-365	7.5mm	6.5mm

PILARES TEMPORALES PARA ELEVACIÓN DE SEÑO

Poste de 2.5mm

Poste de 3.0mm



6.0 x 2.5



6.5 x 2.5



7.0 x 2.5

NO. DE PROD.	DIÁMETRO	ALTURA
260-503	6.0mm	2.5mm
365-503	6.5mm	2.5mm
370-503	7.0mm	2.5mm